

**SAFETY
FIRST**



HAEMATOKRIT 210
Spezialzentrifuge

HAEMATOKRIT 210

In wenig mehr als 6 Minuten ist die Sedimentation bei 16.060 g abgeschlossen.

Eine Laufzeiteinstellung von 10 Minuten reicht in jedem Fall aus. Der Rotor kommt gebremst zum Stillstand.

Jedes Kapillarröhrchen liegt in einer Einzelkammer und wird am Außenrand weich am Boden einer Einzelschale abgestützt. Die Schale dient bei Glasbruch zum Auffangen der Glassplitter und des Röhrcheninhalts und ist bequem zu reinigen und auch austauschbar.

Bei Kapillaren für die quantitative Buffy Coat Analyse kommt der 20-fache Rotor zum Einsatz. Darin werden sie für die nach der Zentrifugation erfolgende Untersuchung vorbereitet.

Bedienfeld der HAEMATOKRIT 210




BEDIENKOMFORT

- übersichtliche Folientastatur
 - gut ablesbares, digitales Display
 - Ist-Zustand-Anzeige während des Laufs
- einfache Eingabe der Parameter
 - RPM in 100er-Schritten
 - Laufzeit in Minuten, max. 99 min

SICHERHEIT

- Deckelzuhaltung
- Not-Entriegelung
- Motorüberhitzungsschutz
- Unwuchtabschaltung
- Stillstandsanzeige

Rotor, 24-fach für Standardkapillaren, mit Deckel als Auswertscheibe

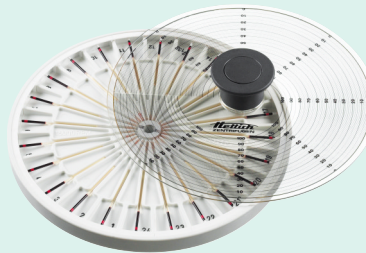

Bestell-Nr.	2076		
Kapillaren pro Rotor	24		
Kapillaren	normal	mylar-verstärkt	selbstdichtend und mylarverstärkt
Bestell-Nr.	2074	1072	1071
Verschlusskitt			
Bestell-Nr.	2077		



Die einzelnen Auffangschalen sind bei undichten Kapillaren bequem zu reinigen und bei Glasbruch austauschbar.



Rotor, 20-fach

Für Kapillaren zur quantitativen Buffy Coat Analyse, mit Deckel (für Standardkapillaren nicht geeignet).

Bestell-Nr. 2056

TECHNIK

HAEMATOKRIT 210

Hämatokrit-Zentrifuge, o. Rotor		
Spannung (andere auf Anfrage)	208 – 240 V 1~	100 – 127 V 1~
Frequenz	50 – 60 Hz	
Anschlusswert	300 VA	220 VA
Funkentstörung	EN 55011 ISM Klasse B	FCC Klasse B
Störfestigkeit	EN 50082-1	-

max. Kapazität	24/20 Kapillaren
max. RPM	13.000 min ⁻¹
max. RCF	16.060

Maße (H x B x T) in mm	247 x 275 x 330
Gewicht	ca. 10 kg

Bestell-Nr.	2104	2104 – 01
--------------------	-------------	------------------

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Gartenstr. 100
D - 78532 Tuttlingen
Germany
www.hettichlab.com
info@hettichlab.com
service@hettichlab.com

Tel. +49 (0)7461 / 705 - 0
Fax +49 (0)7461 / 705 - 125
Verkauf Inland: - 200
International Sales: - 201
Service Inland: - 202
International Service: - 203